


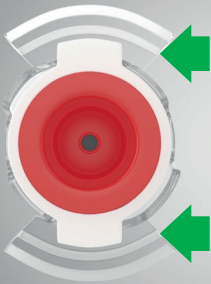
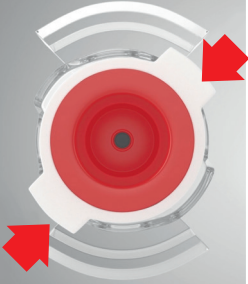





# Biodentine™ XP - Hoe te gebruiken - Do's en Don'ts

Stappen	DO'S 		DON'TS 	
<p>Voor het <b>ACTIVEREN MINGEN &amp; VOORBEREIDEN</b></p> 	<p>Zorg ervoor dat de witte vleugels aan elke kant van de cartridge <b>zijn uitgelijnd</b> met de transparante vleugels.</p>		<p>Manipuleer de cartridge niet te veel in uw handen - de vleugels kunnen verkeerd uitgelijnd raken.</p>	
<p><b>1</b> ACTIVEREN</p>	<p>1) Plaats cartridge en draai <b>90°</b> klokgewijs.</p> <p>2) <b>Gebruik beide handen:</b> een hand op de mixer, de andere hand op de hendel.</p> <p>3) Trek de hendel zachtjes omlaag totdat u een klik hoort, die de cartridge activeert.</p>			
<p><b>2</b> MINGEN</p>	<p>Controleer voor het mengen of de cartridge <b>goed in de houder vastzit.</b></p>		<p>Houd de cartridge houder goed vast met de ene hand en zet de cartridge vast met de andere hand.</p>	
<p><b>3</b> VOORBEREIDEN</p>	<p><b>Onmiddellijk na het mengen, trek de hendel van het pistool horizontaal, breng het patroon in en draai het 90° om te controleren of het goed vergrendeld is.</b></p>		<p>Wacht niet tussen het mengen en prepareren.</p>	<p>Oefen niet te veel kracht uit op de hendel; controleer of deze horizontaal staat.</p>

Septodont NV-SA

87 Grondwetlaan - 1083 Brussel - België

[www.septodont-nl.be](http://www.septodont-nl.be) - [www.septodont.nl](http://www.septodont.nl)

Volg ons op sociale media:

